



**SOLUCIONES DE PESAJE Y
EQUIPOS PARA ALIMENTOS**



MANUAL TÉCNICO
BÁSCULA VETERINARIA
MARCA: BBG MODELO: PET-40

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo

CALIBRACIÓN

1. Presione el botón “**⊕/TARE**” para encender la báscula.
2. Tan pronto como aparezca “0.000kg” en la pantalla, presione el botón “hold” 4 veces (No suelte el botón hasta que aparezca “ISN” en la pantalla).
3. Luego presione el botón “TARE”, coloque el peso de 5 kg en la báscula cuando muestre “5.000” en la pantalla. Luego coloque los pesos de 10 kg, 20 kg y 30 kg en la báscula (cuando muestre “10.000”, “20.00” y “30.00” en la pantalla, respectivamente). La palabra “PASS” aparecerá en la pantalla cuando el ISN esté estable, y luego la báscula mostrará “30.00”. Esto significa que la calibración ha sido exitosa.
4. Finalmente, retire la batería y vuelva a instalarla, encienda la báscula y verifique si el peso es correcto.